

ES - Bestdent Joya Dental

tos de fijación, consulte las fichas técnicas de los propios materiales.

Descripción

Cristal Tooth es una joya dental de cristal, provista de una base para la retención mecánica, que se aplica sin ningún procedimiento invasivo mediante un método adhesivo dental.

Modo de aplicación

1. Aislar el campo con un dique, grabar el esmalte durante 20 segundos, lavar con agua y secar con aire.
2. Aplicar una pequeña cantidad de composite fluido sobre el esmalte grabado.
3. Colocar Joya Dental ejerciendo una ligera presión y dejando una película muy fina entre el diente y la lente.
4. Fotopolimerizar durante 40 segundos.
5. Para aumentar la adhesión, extender una capa fina de adhesivo dentinario sobre el borde del cristal (esto no impide el brillo aunque se aplique sobre el cristalino).
6. Si se produjera un exceso de material adhesivo durante la aplicación, retirarlo con un sistema de pulido (por ejemplo, gomas de silicona).

Colores

Cristal Tooth está disponible en los siguientes colores:

Oro, Cristal, Iridiscente, Azul, Rosa, Verde, Rojo, Negro, Violeta (diámetro Ø1,8 mm).

Advertencias

- El producto debe ser utilizado por profesionales del sector.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Para uso dental.
- No reutilizar el producto.
- Producto no estéril.
- Utilizar guantes antes de su uso.
- Si el producto entra en contacto con materiales oleosos, estos actuarían como aislantes, por lo que se debe grabar la base de Joya Dental con ácido ortofosfórico, enjuagar y secar bien.
- Joya Dental se puede retirar en cualquier momento.
- Para obtener información sobre los efectos secundarios y las interacciones de los produc-

Símbolos



Código del producto



Número de lote



No reutilizar



No estéril



Instrucciones de uso



Fabricante



Distribuidor

Garantía

Dental World sustituirá cualquier producto que resulte defectuoso.

Dental World no se hace responsable de ningún daño o pérdida, directo o consecuente, derivado del uso imprudente o de la incapacidad para utilizar el producto descrito. Antes de utilizarlo, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso. El usuario asume la responsabilidad por el uso imprudente.



PROCLINIC S.A.U.

C/Palermo 9

50197 Zaragoza (España)



DENTAL WORLD S.R.L.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it